

セーブマン アドバンス 波形一覧表 ver.1.2

ECG表示	心拍可変範囲	心拍数可変値	付加波形	PEA設定	備考
SINUS	0・20~200	±10	①②③④	○	0でASYS / ④は心拍20~80間のみ
AF	0・40・75・100・150	—	①	○	0で鋸歯状波のみ
Af	20~200	±10	①②③	○	
2° AV-I	40~60・80	±10	①②③	○	
2° AV-II	40~60・80	±10	①②③	○	
3° AV	0・30~50	±10	①	○	0でP波のみ
PSVT	120~200	±10	—	○	160以下で逆行性P波確認
VT	20~220	±20	—	○	60以下で徐脈のwidQRSとして使用可
VF	—	—	—	×	
VF (f)	—	—	—	×	
VF (vf)	—	—	—	×	
ASYS	—	—	—	×	
Torsades de Pointes	180~220	±20	—	○	
MAT	120~150	±10	—	○	
JUNCT	80~200	±40	—	○	
WPW・Af	160~220	±20	—	○	レートの変によりシュードVTとしても使用可

頸動脈出力	切り替え
PEA	ON/OFF

除細動効果	切り替え
除細動	○ / × (有効) (無効)

TCP状態	切り替え
経皮ペースングモード	○ / × (有効) (無効)

	付加波形	切り替え	備考
①	PVC RonT	ON/OFF	
②	ST 上昇	ON/OFF	
③	ST 下降	ON/OFF	
④	QT 延長	ON/OFF	QTc0.6S

リモコン操作注意事項

カーソルの位置を変更する場合はカーソル上段・下段ボタンを押して移動させ波形を設定してください。

